

ENZYMEX

L9 Beracah MEDICA

Registro Sanitario: 0458C2012 SSA

Clave: 060.066.0930 / 060.066.0872 / 060.066.0971

**DETERGENTE POLIENZIMATICO NO IONICO,
A BASE DE DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO
CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS**



■ DOMINIO DE APLICACIÓN

- Quirófano, endoscopia, oftalmología y contactología

■ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Complejo enzimático combinado a unos potentes tensoactivos
- Integridad del instrumental garantizada durante 72h de inmersión
- Se puede utilizar en lavadoras ultrasónicas
- Franklab tiene las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485
- Activo sobre virus envueltos (**Incluso Coronavirus**)

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



0.5%

CE
0459



Fotografía no contractual

DETERGENTE POLIENZIMATICO NO IONICO, A BASE DE DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS

■ INSTRUCCIONES DE USO

■ Preparación de la solución :

- Usar guantes, lentes y delantal
- Diluir 25 ml de ENZYMEX L9 para 5 litros de agua de la llave (20°C) y homogeneizar la solución

■ Utilización:

- 1- Sumergir totalmente los dispositivos médicos sucios en la solución.
- 2- Cepillar los dispositivos médicos, y pasar el hisopo si es necesario
- 3- Tiempo de contacto : 5 minutos para lavado
10 minutos para una actividad biocida
- 4- Enjuagar abundantemente

■ PROPIEDADES DESINFECTANTES

Actividades	Normas	Concentración	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13727	0,5%	5 minutos
	EN 14561	0,5%	10 minutos
Levuricida	EN 13624	0,5%	5 minutos
	EN 14562	0,5%	10 minutos
Virucida	EN 14476 (<i>Virus PRV modelo del hepatitis B</i>)	0,5%	5 minutos
	EN 14476 (<i>Virus DBV modelo del hepatitis C, Virus VIH</i>)	0,5%	10 minutos

■ PRECAUCIONES DE USO

Referirse a la Ficha de Seguridad (FS 010435)

■ CARACTERÍSTICAS

- Aspecto : **Líquido**
- Color : **Verde**
- pH puro : **8.3**
- pH a 0,5% : **7.7**
- Caducidad : **2 años**

■ COMPONENTES

- Agentes tensoactivos no iónicos
- Amonio cuaternario
- Enzimas
- Agentes secuestrantes

■ PRESENTACIÓN

- ① Caja de 250 dosis de 25 mlref. **1043547**
- ② Caja de 12 bidones de 1 Lref. **1043516**
- ③ Caja de 4 bidones de 5 Lref. **1043520**



Fotografía no contractual

Producto peligroso - respetar las precauciones de uso. Leer la etiqueta y la información relativa al producto antes de usar. Dispositivo médico de Clase IIB.



Distribuidor
Beracah
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979



FT
772

F4v9_06.2018