

DDN Surf Beracah M E D I C A

DETERGENTE DESINFECTANTE NEUTRO
PARA LA BIOLIMPIEZA DE PISOS, SUPERFICIES
Y EQUIPO MÉDICO

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y EQUIPO



TRATAMIENTO DE PISOS



■ VENTAJAS Y CALIDAD

- Solución con pH neutro
- Sin CMR*
- Activo contra *Clostridium Difficile*
- Compatibilidad con una amplia gama de materiales
- Fresco aroma
- Registro de biocidas: TP 02 (N° de inventario:32082)
- Descontaminación de la radiactividad

* Carcinogénico, Mutagénico,
Tóxico para la Reproducción



0.25%
a 2%

DETERGENTE DESINFECTANTE NEUTRO PARA LA BIOLIMPIEZA DE PISOS, SUPERFICIES Y EQUIPO MÉDICO

■ MODO DE USO

■ Preparación de solución de biolimpieza:

- Utilizar guantes, gafas y delantal
- **Para la limpieza especializada de pisos y superficies en alimentos, industrial y comunitario:**
Diluir 80 ml de DDN Surf en 8 litros (1%) de agua de la red y homogeneizar la solución (160 ml de DDN Surf por 8 litros de agua (2%) para una acción fungicida)
- **Para la limpieza de pisos, superficies, equipo médico y materiales en el sector hospitalario:**
Diluir 20 ml de DDN Surf en 8 litros (0.25%) de agua de la red y homogeneizar la solución
- **Para la descontaminación de la radiactividad:**
Diluir 500 ml de DDN Surf en 5 litros (10%) de agua de la red y homogeneizar la solución

■ Uso:

- 1- Limpiar el piso, superficie ó dispositivo médico utilizando una escoba, cepillo ó paño húmedo
- 2- Tiempo de contacto: 5 minutos mínimo (15 minutos para una acción fungicida)
- 3- Enjuague completamente con agua. *El enjuague del DDN Surf no se requiere para otras aplicaciones a menos que el fabricante del recubrimiento de la superficie recomiende lo contrario.*

■ PROPIEDADES DESINFECTANTES

Actividades	Normas	Concentración	Tiempo de Contacto
Bactericida	EN 13727 + A1	0.25%	5 minutos
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minutos
Levuricida	EN 13624	0.25%	5 minutos
	EN 1650	0.5%	5 minutos
	EN 13697	1%	5 minutos
Fungicida	EN 13697	2%	10 minutos
	EN 1650	2%	15 minutos
Virucida	EN 14476 PRV (modelo de virus de Hepatitis B)	0.25%	1 minuto
	EN 14476 + A1 HIV	0.25%	15 minutos
Esporicida	EN 13704 C.difficile	1%	15 minutos

■ PRECAUCIONES DE USO

Consulte la hoja de seguridad (FS 010760)

■ CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Verde
- pH a 0.25%: 6.4
- pH a 2%: 7.0
- pH a 10%: 7.0
- Caducidad: 2 años

■ COMPOSICIÓN

- Agentes tensioactivos no iónicos
- Agentes secuestrantes
- Amonio cuaternario
- Aceite esencial de menta

■ ACONDICIONAMIENTO

- ① Caja de 12 bidones de 1 L.....réf. **1076016**
- ② Caja de 4 bidones de 5 Lréf. **1076020**



Producto peligroso - observe las precauciones de uso. Usa los biocidas con cuidado. Antes de usar, lea la etiqueta y la información del producto.



Distribuidor ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979



**FT
1190.L**
F1v11_08.2018