

# Sierra Corta yeso



# Características Técnicas

La **Sierra Cortadora de Yeso Trauma Medical** tiene un diseño ergonómico pensado en fácil manejo de la misma.

La sierra cortadora de yeso tiene un diseño ergonómico pensado en fácil manejo de la misma.

- Ligera, permite una óptima maniobrabilidad.
- Minimiza la fatiga de la muñeca.
- Producto con certificado CE 2195 - 1139592 ( calidad de producto )

## Principales Partes

1. **Cuerpo principal:** Esta sierra tiene un motor adaptado de la mas alta calidad, lo que le permite ser esterilizada a alta temperaturas (135°C) y presiones, con un tiempo de vida y de confiabilidad bastante alto.
2. **Cargador de Batería:** El cargador de batería ha sido adaptado para proporcionar una carga completa con mayor rapidez, ya que puede cargar la batería completamente en un máximo de 3 horas.
3. **Batería:** La batería cuenta con tecnología NI - MH sin entrono de memoria de 14.4 V. con nuevo diseño que favorece la fácil degradación de sus componentes y consecuentemente la protección al medio ambiente.

No es necesario su esterilización.



- 1.- RPM 1,250
- 2.- Potencia: 125 W
- 3.- Peso: Unidad Central 1.000g
- 4.- Tamaño 185 mm x 40 mm 195 mm

# Metodo de uso

Se debe de sujetar de la siguiente manera (figura 1) para su correcto funcionamiento y para no dañarse a sí mismo ni a un tercero.

La sierra debe conectarse a la corriente de luz y encenderse para funcionar y una vez terminado su uso debe apagarse (figura 2).

La hoja de corte solo funciona de manera oscilatorio, no de manera rotatoria (figura 3).

## Transportación y Almacenaje

Para asegurar el rendimiento y seguridad de este equipo, se debe de guardar propiamente en su caja original cuando no este en uso o sea transportado. Asegurese también que la caja se encuentre en un lugar seco y sin humedad.



# Componentes set Sierra corta yeso

1 Estuche portador

2 Sierra corta yeso


3 Cable de poder con clavija

4 Hoja p/sierra de yeso

5 Llave Allen

6 Interruptor de encendido -apagado

7 Ducto de ventilación

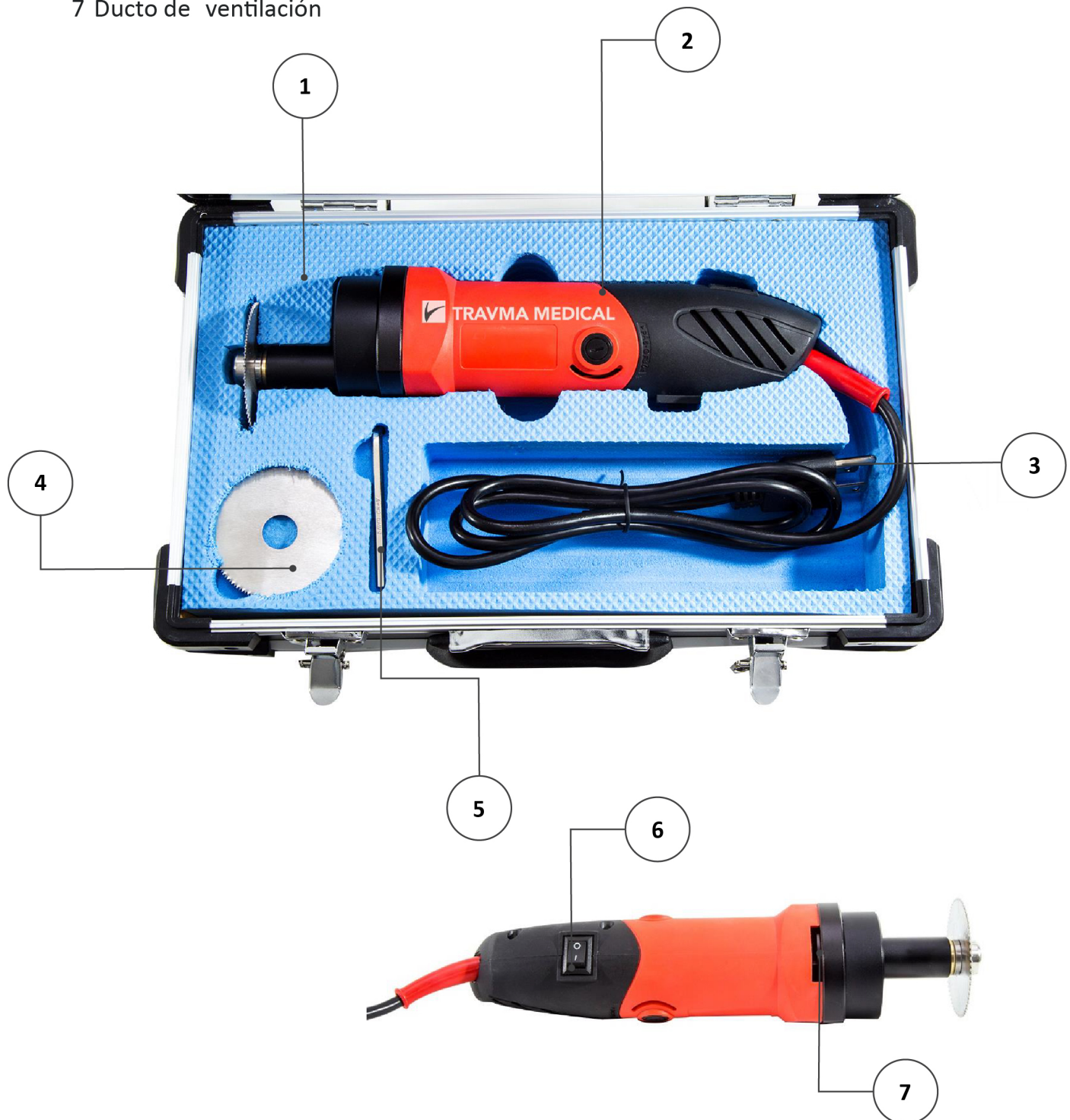

# Mantenimiento

Para prolongar la vida de su **Sierra cortadora de yeso Tragma** y poder hacer válida la garantía; debe de seguir las siguientes instrucciones:

- 1.- Almacene su Sierra cortadora de yeso siempre en un lugar seco y estable.
  - 2.- Para limpiarla utilice un paño suave y seco, no utilice disolventes, químicos ni paños húmedos.
  3. Los orificios siempre deben de permanecer limpios para evitar el sobrecalentamiento de la sierra cortadora, para esto es necesario limpiarla cada vez que se utilice y no dejar que se almacenen residuos de yeso.
  - 4.- La Sierra es únicamente para cortar yeso.
- 5-Este producto no se debe guardar o utilizar en lugares donde este expuesto a ser salpicado o mojado por líquidos, gotas de lluvia, salpicaduras de agua, zumos, café, vapor, etc. Ya que perjudican el correcto funcionamiento del producto.

## Precauciones y compromiso de Garantía

**A FIN DE QUE SU SIERRA CORTADORA DE YESO FUNCIONE DE MANERA CORRECTA, RECOMENDAMOS TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:**

- \*Este es un producto designado para uso médico.
- \***NO** se deberá utilizar para otro fin.
- \*Este equipo no está diseñado para uso **continuo, su uso correcto es intermitente.**
- \***Usar** el equipo un **máximo de 25 minutos**, y deje descansar un mínimo de 5 minutos entre corte y corte antes de volver a utilizar, el exceso de su uso continuo podrá causar sobrecalentamiento que puede dañar permanentemente el producto y causar daños al usuario.
- \*Antes de conectar la sierra cortadora de yeso, asegúrese de que el contacto y de que el enchufe y el voltaje son compatibles (110 V)
- \***NO** manipular nunca los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión y derivación.
- \***NO** se debe conectar ni usar la sierra cortadora de yeso con las manos mojadas o húmedas.
- \*Si la cortadora de yeso da corriente, se debe de desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado, si la operación de desconexión resulta peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión de la sierra cortadora de yeso.
- \*Para evitar cualquier daño al usuario y al mismo producto **NO** se deberá abrir la sierra por ningún motivo.

## La garantía carecerá de validez bajo las siguientes circunstancias:

- 1.- Cuando la sierra hubiese sido utilizado de manera diferente a la indicada en este manual.
- 2.- Cuando presente daños físicos tales como golpes, raspaduras o enmendaduras.
- 3.- Cuando la sierra hubiese sido abierto, manipulado y/o intervenido por establecimientos distintos a los autorizados por **Travma Medical**.
- 4.- Cuando hubiese sido utilizado con accesorios distintos a la marca Travma Medical.

## Tiempos de Garantía

Cuerpo Principal (Motor) **1 año**

Accesorios **60 DÍAS**

**\*NOTA IMPORTANTE:** Esta garantía no aplica contra defectos estéticos tal como cambios de coloración en la Sierra Corta Yeso Travma Medical y/o accesorios por la esterilización ó paso del tiempo.

## Servicios adicionales a la garantía

- Mantenimiento
- Venta de refacciones
- Reparación

### ESTE EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA CORTAR VENDAJES DE YESO O ESCAYOLA

Cualquier intento por cortar otro tipo de materiales como plásticos, metales, madera, fibra de vidrio, etc. Podrá dañar las hojas de corte, sobrecalentará el equipo pudiendo causar daños permanentes a la sierra y causar daños al usuario.



**EL USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO HARÁ  
QUE SU GARANTÍA PIERDA VALIDEZ**

## NOTA IMPORTANTE:

**Si necesita resparar esta unidad, diríjase con su  
distribuidor autorizado por Travma Medical.**



Distribuidor



✉ [ventas@beracahmedica.mx](mailto:ventas@beracahmedica.mx)

☎ 662 15 10 979