


CÁNULAS EASYGRIP®

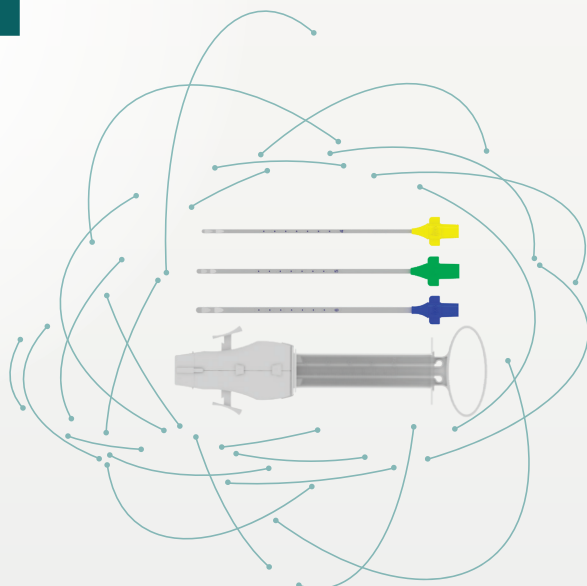

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN

Dispositivos no reutilizables



AMEU en la 1ª opción para la evacuación uterina instrumentada segura, recomendada por:



Organización
Mundial de la Salud



FIGO
INTERNATIONAL FEDERATION
OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS



CÁNULAS EASYGRIP[®]

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN

Registro: 1461E2015 SSA

Caducidad de blíster: 5 años

Medidas del dispositivo: 24 cm de largo aprox.

Categoría: Equipo médico

DISPOSITIVOS NO REUTILIZABLES



Dispositivos utilizados para el procedimiento de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)

Características:

- Hechas de plástico de polipropileno sin látex
- Desechables
- Semirrígidas
- Empaque individual esterilizado
- Base con aletas integradas, diferenciadas por colores
- Pautas de inserción impresa
- Disponible en 8 diámetros: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm
- Cánulas de 4 a 8 mm con dos aberturas opuestas
- Cánulas de 9, 10 y 12 mm con una abertura mayor

Indicaciones:

- Tratamiento de abortos incompletos de hasta 12 semanas de edad gestacional
- Evacuación endouterina por:
 - Aborto incompleto
 - Embarazo anembrionario
 - Mala hidatiforme
 - Retención de restos placentarios
 - Aborto diferido
- Biopsia de endometrio

Contraindicaciones: No se conoce alguna


Recomendaciones:

Utilizar una cánula del tamaño adecuado a la dilatación del cuello uterino. Si se utiliza una cánula demasiado pequeña, podría ocurrir una retención de tejidos o la pérdida de succión.

Clave de cuadro básico:

- 4 mm. Amarillo 060.166.0558
- 5 mm. Verde 060.166.0566
- 6 mm. Azul 060.166.0574
- 7 mm. Café 060.166.0582
- 8 mm. Blanco 060.166.0590
- 9 mm. Café oscuro 060.166.0608
- 10 mm. Verde oscuro 060.166.0616
- 12 mm. Azul oscuro 060.166.0624

Disponible en 8 diámetros:

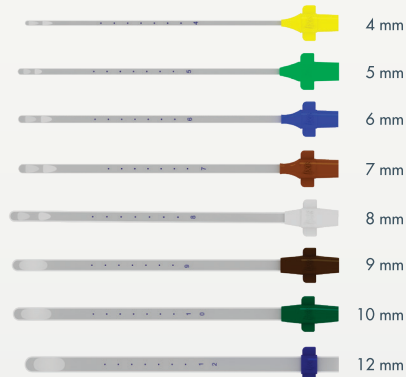

Tamaños de cánulas recomendadas de acuerdo a la altura uterina:

Tamaño uterino (semanas desde la FUM*)	Tamaño de la cánula
4 a 6 semanas	Cánula de 4 a 7 mm
7 a 9 semanas	Cánula de 5 a 10 mm
9 a 12 semanas	Cánula de 8 a 12 mm

Para la biopsia del endometrio: Cánulas de 4 mm

*FUM: Fecha de la última menstruación
Referencias: Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro, OMS 2014

Se recomienda utilizar las cánulas EasyGrip con el aspirador MVA Plus (jeringa con volumen de 60 cc).

Volumetrías:

INDIVIDUAL	Altura	Longitud	Peso
Cánula 4 mm.	31.9 cm	8 cm	0.01 Kg
Cánula 5 mm.	31.9 cm	8 cm	0.01 Kg
Cánula 6 mm.	31.9 cm	8 cm	0.01 Kg
Cánula 7 mm.	31.9 cm	8 cm	0.01 Kg
Cánula 8 mm.	31.9 cm	8 cm	0.01 Kg
Cánula 9 mm.	31.9 cm	8 cm	0.01 Kg
Cánula 10 mm.	31.9 cm	8 cm	0.011 Kg
Cánula 12 mm.	31.9 cm	8 cm	0.012 Kg

CORRUGADO con 34 piezas

	Altura	Longitud
Cánula 4 mm.	46 cm	7.4 cm
Cánula 5 mm.	46 cm	7.5 cm
Cánula 6 mm.	46 cm	7 cm
Cánula 7 mm.	46 cm	7 cm
Cánula 8 mm.	46 cm	7 cm
Cánula 9 mm.	46 cm	7 cm
Cánula 10 mm.	46 cm	6.4 cm
Cánula 12 mm.	46 cm	6.9 cm



CALIDAD INTERNACIONAL



Distribuidor

ventas@beracahmedica.mx

Beracah
MEDICA

662 15 10 979

